



SIMULADOR DE RCP NEONATAL CON LUCES DE RETROALIMENTACIÓN

MARCA: PRESTAN
MODELO: PP-IM-100M-MS

Este maniquí neonatal de cuerpo completo permite a los estudiantes medir su propia tasa de compresión mientras practican la RCP. El monitor también permite a los instructores guiar a varios estudiantes a la vez.

El monitor de frecuencia de RCP con cuatro luces brillantes en el abdomen les permite a los estudiantes ver cuándo han alcanzado la frecuencia adecuada de compresiones y les facilita a los instructores verificar de manera rápida y precisa el progreso de varios estudiantes.

Sensación realista con inclinación de la cabeza / elevación del mentón, elevación del pecho y puntos de referencia anatómicos

Clicker de compresión

Vías respiratorias desechables

Sin látex

Maniquí de piel media

INCLUYE

01 simulador neonatal

10 protectores boca-pulmon

Bolsa de transporte

NO INCLUYE PILAS

MONITOR DE RCP - GUIA

El Monitor de RCP es una herramienta de entrenamiento patentada que viene pre instalada (con baterías incluidas) en el área del pañal del Maniquí Profesional Neonato Prestan. Se usted ha comprado un Maniquí Profesional Neonato Prestan sin Monitor de RCP y luego decide que desea esta herramienta, puede adquirir e instalar el monitor con posterioridad.



Figura 1

El Monitor de RCP del maniquí de entrenamiento Neonato tiene una forma única de monitorizar tanto la profundidad como el ritmo de las compresiones:

Presionar el botón en el pañal para encender el monitor. La pequeña luz verde se encenderá hasta que se vuelve a presionar el botón para apagar el monitor. Las cuatro luces del monitor se encenderán indicando que funcionan correctamente. (Figura 1)



Figura 2; <60 cpm

Si las luces no se encendieran, asegurarse de que la profundidad de las compresiones es suficiente (se oirá un click). Las luces no se encienden si el alumno no está realizando las compresiones correctamente.

Una vez que el alumno comienza con las compresiones torácicas, de 0 a 60 compresiones por minuto, se encenderá la luz roja. (Figura 2)



Figura 3; 60-80 cpm

A medida de que el alumno aumenta la frecuencia de las compresiones y alcanza las 60 compresiones por minute, se encenderá la luz amarilla hasta que el alumno alcance las 80 compresiones por minuto. (Figura 3)



Figura 4; 80-100 cpm

A medida que el alumno aumenta la frecuencia de las compresiones y alcanza las 80 por minute, se encenderá la primera luz verde hasta que se alcancen las 100 compresiones por minuto. (Figura 4)



Figura 5; 100-120 cpm

Cuando el alumno ha alcanzado las 100 compresiones por minuto, se encenderá una segunda luz verde, lo cual indica que se ha alcanzado la frecuencia recomendada de compresiones torácicas. (Figura 5)

Si el alumno reduce la frecuencia de compresiones. Una de las luces verdes se apagará, indicando que se debe aumentar la frecuencia de compresiones.

Si la frecuencia de las compresiones excede las 120 por minuto, se encenderá una luz amarilla indicando que se debe alcanzar la frecuencia recomendada. (Figura 6)



Figura 6; >120 cpm

Siempre intentar mantener la velocidad recomendada de entre 100 y 120 compresiones por minuto como se indica con las dos luces verdes.

Si no fuera correcta la profundidad de las compresiones torácicas, sea en el momento que sea, se apagarán todas las luces y parpadeará una luz roja.